

Informační leták

Vyrobeno společností:

PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN. BHF.

Lot 5322, 15th Miles, Jalan Padang Gajah

45800 Jeram, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: 603 – 3250 0377; Fax: 603 – 3250 3069

Web: www.plp.com.my



Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53

1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +32 2.732.59.54

Email- mail@obelis.net

Symbol	Definition
	Používejte do
	Datum výroby
	Udržujte v suchu
	Udržujte mimo sluneční světlo
	Na jedno použití
	LOT

	Obsahuje latex
	Nepoužívejte, jestli je obal poškozený
	Pozorně si přečtěte návod k použití
	Výrobce
	Nesterilní
	Zdravotnický prostředek
	Unikátní identifikace přístroje
	Dodavatelské informace
	Zástupce pro EU
	Informace o distributorovi
	Objednací číslo

Upozornění pro uživatele: nahlásit výrobci jakýkoli závažný incident/
autorizovanému zástupci a příslušnému orgánu své země.

NÁVOD K POUŽITÍ OCHRANY VAGINÁLNÍ SONDY

Datum vydání: 01-09-2022 (rev. 00) - MDR 2017/745

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

URČENÍ UŽIVATELE

Pouze pro použití zdravotnickými pracovníky.

URČENÁ POUŽITÍ

Jako ochranný kryt při zamezení kontaminace sond ultrazvukových snímačů tělesnými tekutinami. K usnadnění čištění a dezinfekce sond.

Nepoužívejte opakovaně, protože by mohlo dojít a zvýšenému riziku infekce.

INDIKACE K POUŽITÍ

Zkontrolujte, zda je datum spotřeby aktuální.

Otevřete obal krytu sondy jemným a opatrným roztržením.

Ujistěte se, že srolovaná část krytu sondy, která se má rozbalit, je na vnější straně.

Umístěte kryt sondy špičku sondy ultrazvukového snímače a opatrně jej rozviňte až ke konci sondy.

Pokud je nutná lubrikace, nepoužívejte s touto ochranou vaginální sondy lubrikanty na bázi oleje, protože lubrikanty na bázi oleje mohou poškodit ochranu sondy. Používejte lubrikanty na vodní bázi.

Pouze pro jednorázové použití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.

ZNEUŽITÍ

Použitý kryt sondy likvidujte hygienicky a ohleduplně.

UPOZORNĚNÍ: TENTO VÝROBEK OBSAHUJE PŘÍRODNÍ GUMOVÝ LATEX, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT ALERGICKÉ REAKCE VČETNĚ ANAFYLAKTICKÉHO ŠOKU.