

# schülke +



Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek určený pro manuální čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků.

## desam® effekt +

### Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Nedráždí dýchací cesty
- Použití i v přítomnosti pacientů
- Kompatibilní s opakovaně plnitelným zásobníkovým systémem schülke wipes

### Oblast použití

desam® effekt + je určený k dezinfekci a mytí povrchů zdravotnických prostředků. Je vhodný pro použití ve všech oblastech zdravotnictví.

Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akrylát. Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.

### Účinnost

Baktericidní, virucidní (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota / Adeno), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

### Návod na použití

Pracovní roztok se připraví naředěním koncentrátu desam® effekt + ve vodě o teplotě 20 °C -25 °C. Roztok se aplikuje otřením. Dbejte na důkladné smočení povrchu zdravotnického prostředku. Není určen kdezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Nepřekračujte dobu expozice.

CE 1023



# desam® effekt +

## Složení

100 g přípravku desam® effekt + obsahuje následující aktívni látky:

- 19 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chlorid
- 10 g 2-fenoxyethan-1-ol
- 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 3 g Didecyldimethylammonium chlorid

## Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nevhodný na barevné kovy (měď, mosaz), nelegované oceli, barevně nestabilní materiály, silikony a polykarbonát. Skladovat v originálních, dobře uzavřených původních obalech v suchých prostorách.

Doba expirace: 24 měsíců

## Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desam Effekt + 1 l FL	12/Karton	70002117
Desam Effekt + 5 l KA	1/Kanystr	70002118

## Související přípravky

- antifect® extra
- terralin® protect

## Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

## Typ přípravku

Zdravotnický prodstředek tř II.a



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnení výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

**Výrobce**  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
[www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)  
[schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)