

Návod k použití kyslíkové masky na jedno použití

Schéma produktu:

Typ	Konstrukční součásti	Poznámka
Kyslíková maska	Konektor, hadičky, rozhraní, maska L, hliníkový štítek, páska	Podle velikosti masky a kyslíkové hadičky jsou rozděleny na: XS, S, M, L, L3, XL

Výkon produktu:

Kyslíková maska by neměla dráždit pokožku a stupeň cytotoxicity by měl být nižší než 2.

Účel použití

Kyslíková maska je zdravotnický prostředek určený k použití při dodávání kyslíku pacientům. Flexibilní, tvarovaná pomůcka je konstruovaná pro umístění na nos a ústa pacienta k vedení anestetických plynů do horních cest dýchacích.

Pokyny k použití:

1. Připojte hadičku přívodu kyslíku ke zdroji kyslíku a nastavte předepsaný průtok kyslíku.
2. Zkontrolujte průtok kyslíku.
3. Umístěte masku na obličej pacienta s elastickou páskou vedoucí pod ušima a kolem krku.
4. Lehce stiskněte konce pásky, aby se maska zajistila.
5. Vytvarujte kovový proužek na masce tak, aby dobře seděla na nose.

Bezpečnostní opatření:

1. Na jedno použití. Po použití zlikvidujte.
2. Nepoužívejte, je-li obal otevřený nebo poškozený.
3. Neskladujte při extrémních teplotách a vlhkosti. Skladujte na suchém a chladném místě.

Expirace:

3 roky

Skladování:

Produkt má být skladován při relativní vlhkosti nižší než 80 %, prostředí pro skladování má být bez korozivních plynů, suché, bez slunečního světla, dobře větrané a čisté.

Sterilizace:

Nesterilní

Vysvětlení symbolů:



Adresa : No.12 Yuexing Technology Park, No.11 Fanrong road, Binhai New Area, 312366 Shaoxing, Zhejiang Province, China

Tel. č. : 86 575 8521 5008

Fax. č. : 86 575 8521 5007

Název : Lotus NL B.V.

Adresa : Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel. č. : +31645171879 , +31626669008