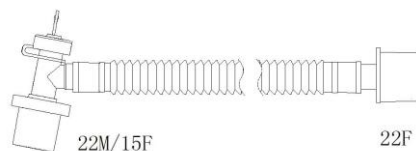


Pokyny k použití: Spojka katetru**Schéma**

Produkt	Typ	Konstrukční součásti
Jednorázová spojka katétru	ETS-15 ETS-20	Přímý konektor + trubice s hladkým otvorem + dvojité otočné kolénko
	ETE-15 ETE-20	Přímý konektor + roztažitelná trubice + dvojité otočné kolénko
	ETC-15 ETC-20	Přímý konektor + vlnitá trubice + dvojité otočné kolénko

Nákres:**Účel použití**

Používá se pro snížení tažné síly u vedení trubic k pacientovi během používání anesteziologických přístrojů nebo ventilátorů.

Pokyny k použití:

1. Vyjměte produkt z obalu, zamezte znečištění sterilního produktu;
2. Před použitím produktu na pacientovi zkontrolujte všechny konektory produktu a utěsněte všechna připojení, aby nedocházelo k úniku a uvolnění během jeho používání.
3. Postupujte podle návodu k použití přístroje pro testování produktu, abyste ověřili, že je produkt kompatibilní s používaným přístrojem a ověřte, že produkt nikde neuniká a je bez blokáce.
4. Při používání produktu zajistěte, aby pacient byl důkladně monitorován.
5. Pravidelně produkt kontrolujte, je-li zjištěno, že je produkt kontaminován nebo již není vhodný pro určené použití, je nutno produkt ihned vyměnit.
6. Před použitím produktu na pacientovi dbejte opatrnosti, aby nedošlo k vniknutí cizorodých částic do produktu.
7. Je-li produkt používán, přímý konektor je připojen k patientskému konci potrubí anesteziologického přístroje nebo ventilátoru a otočný kloub je připojen k intubačnímu nebo jinému příslušnému nástroji.

Bezpečnostní opatření:

1. Obsluha tohoto produktu musí být odborně vyškolená.
2. Tento produkt je sterilizován pouze pro použití na jednom pacientovi, po použití jej zlikvidujte, nesterilizujte ani nepoužívejte opakovaně.
3. Je třeba produkt použít ihned po otevření obalu, po použití je třeba produkt zlikvidovat.
4. Produkt se nesmí použít, je-li obal poškozen nebo je-li navlhlý či plesnivý.

Varování :

Tento produkt je určen pouze pro jednorázové použití, po použití nemůže být opět znovu použit ani po vyčištění.


Expirace:

3 roky od data sterilizace

Skladování:

Zabalené dýchací nebo anesteziologické okruhy je třeba skladovat ve větrané místnosti, kde vlhkost nepřesahuje 80 %, bez přítomnosti korozivních plynů.

Sterilizace: Sterilizováno etylenoxidem

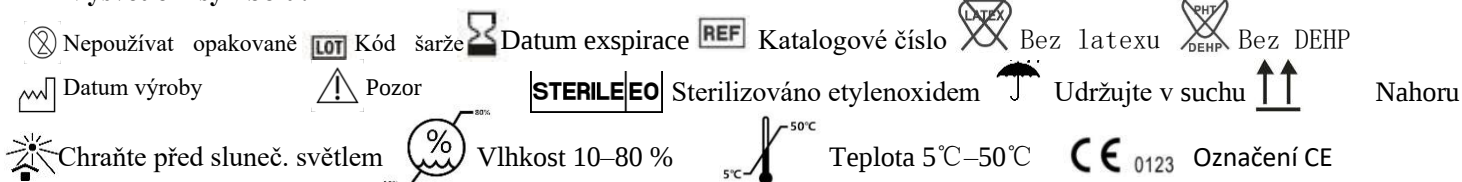Vysvětlení symbolů:

Výrobce : Shaoxing Undis Medical Technology Co., Ltd

Adresa : No.12 Yuexing Technology Park, No.11 Fanrong road, Binhai New Area, 312366 Shaoxing, Zhejiang Province, China

tel. : 86 575 8521 5008

Fax. : 86 575 8521 5007

EC REP Lotus NL B.V.

Adresa : Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel. : +31645171879, +31626669008