



**Rychlý
účinek**

Tekutý alkoholový přípravek, určený k rychlé dezinfekci a čištění povrchů zdravotnických prostředků

desam® spray

Naše Plus:

- Okamžitě k použití
- Zaručuje rychlý dezinfekční efekt
- Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
- Dobrá materiálová snášenlivost
- Kompatibilní s utěrkami wetsack a schülke wipes

Oblast použití:

desam® spray je vhodný k rychlé dezinfekci zdravotnických prostředků. Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat.

Návod na použití:

desam® spray se neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru. Dbejte na rovnoměrné nanesení přípravku (rozetřít utěrkou) a nechte jej působit po dobu expozice, přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, makrolon, guma, měkčené PVC, lakované povrchy). Není určen pro dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

Související přípravky:

- mikrozyd® AF liquid



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Air Liquide
HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

Složení:

100 g přípravku desam® spray obsahuje následující účinné látky:

- 45 g Ethanol
- 30 g Isopropanol
- 0,025 g Didecyldimethylammonium chloride

Účinnost:

Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, levurocidní

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nevdechujte aerosol. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně a přímého slunečního záření. **Teplota skladování:** -10 až +25 °C.

Životní prostředí:

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIa

Výrobce:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schulke.com