

SPRAGUE RAPPAPORT - fonendoskop



Návod na použití

POPIS

Tento zdrav. prostředek je dvouhlavý fonendoskop opatřený velkou a malou membránou na otáčivém dvojitěm hlavovém bubínku, který obsahuje nepropustnou chlopeň sestrojenou s největší přesností. Lze jej použít v pěti různých variantách, proto nahrazuje jiné stetoskopy a funguje jako 5 stetoskopů k 5 účelům v jednom jediném nástroji. Součástí přístroje jsou 2 velikosti ušních koncovek /olivek/, které umožňují uživateli volbu optimálního poslechu.

URČENÍ PROSTŘEDKU

Fonendoskop je určen pro odborný personál poskytovatele zdravotní péče, který je schopen využít jeho vlastností v poslechovém hodnocení činnosti srdečních funkcí a celého systému krevního oběhu a dýchacího ústrojí. Vysoká citlivost fonendoskopu umožňuje čistě rozeznat nízké a vysoké frekvence i slabé šумы.

POUŽITÍ

Nejdříve vložte ušní koncovky /lyru/ do uší.

Jemným poklepem prstu na membránu zjistíte, zda zvuk prochází a zda je bubínek ve funkční pozici.

Pokud neslyšíte zvuk poklepu, otočte hlavu fonendoskopu o 180° tak, aby zapadla do správné pozice. Tím uvedete do funkce požadovanou stranu hlavy fonendoskopu.

5 způsobů použití fonendoskopu:

1. Velká membrána – obecně se poslechový disk používá k zachycování srdečních zvuků nízké frekvence, diastolické a terciální srdeční zvuky stejně jako primární a sekundární zvuky. Tato hlava zachytí i vysokofrekvenční šумы vycházející ze srdce.
2. Malá membrána – je určena k zachycení vysokofrekvenčních srdečních zvuků u dítěte.
3. Plastový zvonovitý poslechový disk pro dospělé – slouží k zachycení zvuků a šumů nízké a střední frekvence.
4. např. mezi žebry nebo jakákoli jiná malá místa k zachycení zvuků a šumů nízké a Plastový poslechový disk střední velikosti – pro úzká místa jako střední frekvence.
5. Plastový poslechový disk / kroužek / dětské velikosti – nejvhodnější k vyšetřování malých dětí. Nejlépe zachytí zvuky a šумы nízké a střední frekvence vycházející z dětského srdce.

NÁHRADNÍ DÍLY, PŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPLŇKY


Obj.č.	Název výrobku
P 00218	Barva černá
P 00221	Barva modrá
P 00225	Barva zelená
P 00226	Barva vínová

ZÁRUČNÍ LHŮTA A SERVIS

Záruka se vztahuje na vady materiálu, vady vzniklé při výrobě a za podmínky, že výrobek je používán v souladu s návodem na jeho používání.

Záruční a pozáruční servis zajišťuje dovozce:

POLYMED medical CZ, a.s.
 P. Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové
 tel.+ fax: 495 220 206, 495 211 387

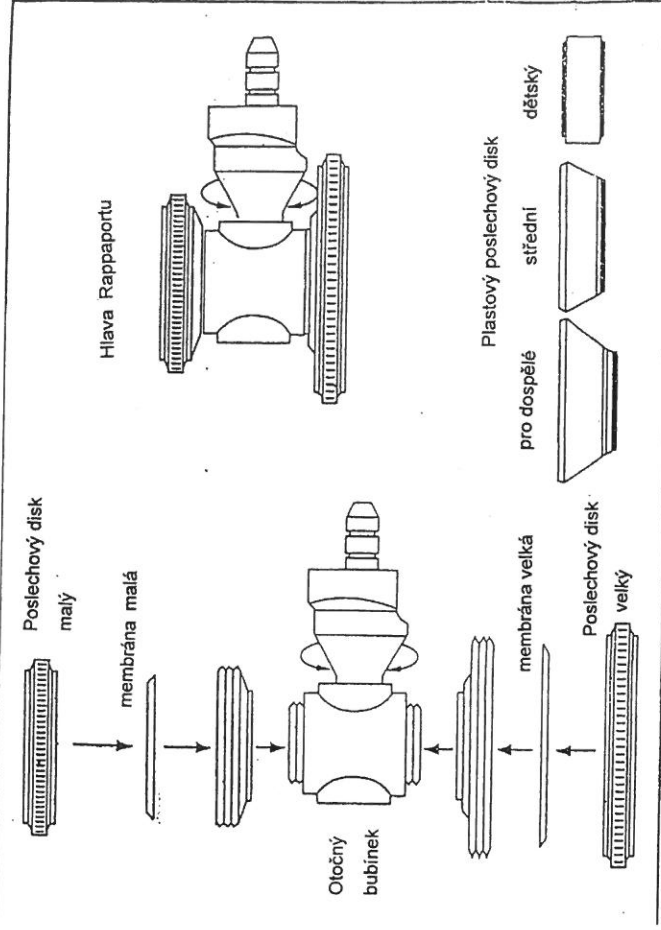

CHIN KOU MEDICAL CO., LTD. SPIRIT MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.
 2 Floor, No.68, Section2, Guo Dao Road, Luzhou District, New Taipei City, Taiwan R.O.C