



## Gel pro EKG

Návod k použití

Obj.č. P 02895a

### POPIS

GEL pro EKG a defibrilaci.

EKG GEL je určen ke snížení odporu mezi kůží a elektrodami. Gel je také vhodný pro defibrilaci prováděnou s elektrodami pro opakované použití.

GEL EKG neoxiduje, neobsahuje mastné látky, nezanechává trvalé zbytky na elektrodách a je snadno odstranitelný.

Obsahuje baktericidní Euxyl®K 100, jehož aktivními složkami jsou benzylalkohol, Methylchloroisothiazolinone (MS), Methylisothiazolinone (MI).

Vyhovuje normě o biokompatibilitě ISO 10993-1:2003.

### !POZOR!

- Pouze k vnějšímu použití.
- Dodaný výrobek není sterilní.
- Nenanášejte gel na podrážděné oči nebo pokožku, nebo pokožku poškozenou nebo u zranění.
- Výrobek může způsobit podráždění nebo zčervenání kůže zejména u alergiků.
- Nepolykejte.
- Lahvičku po použití uzavřete.
- Pro defibrilaci naneste důkladně gel na celý povrch elektrod, nezakryté kovové části mohou způsobit popáleniny. Nepoužívejte na elektrody, které již mají gelovou úpravu.

### POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

- **Oči:** V případě náhodného kontaktu s očima je pořádně vyplachujte vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře.
- **Kůže:** Pokud dojde k podráždění kůže, důkladně omyjte vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Požítí:** Náhodné požití není většinou nebezpečné, ale pokud nastanou komplikace, poradte se s lékařem.



## INSTRUKCE K POUŽITÍ

- Osoby citlivé na MCI/MI musí použít ochranné rukavice.
- Očistěte a odmastěte kůži pacienta.
- Naneste požadované množství gelu.
- Aplikujte a připojte elektrody k přístroji podle pokynů dodaných výrobcí.
- Pro použití u defibrilace naneste gel pečlivě na celý povrch elektrod a postupujte podle pokynů k obsluze přístrojů.
- Po ukončení odstraňte všechny zbytky gelu papírem, TNT (netkanou textilií), nebo gázou navlhčenou vodou.

## ZÁRUKA - UPOZORNĚNÍ

Výrobce garantuje, že výrobek je v souladu se směrnicí 93/42/EHS a byl vyroben v souladu s postupy podle systému certifikace kvality společnosti podle ISO13485. Výrobce nenese odpovědnost a nepřejímá nároky za náklady na zdravotní péči, přímé nebo nepřímé škody způsobené chybějící funkcí nebo selháním uvedeného výrobku, jestliže není výrobek použit v souladu s návodem k použití. Pro zajištění kvality servisu doporučujeme hlásit jakoukoliv případnou poruchu nebo závadu výrobku. Datum použitelnosti je uvedeno na lahvičce.

## LIKVIDACE ODPADŮ

Odpady pocházející ze zdravotnických zařízení se musí likvidovat v souladu s platnými předpisy. Gel je rozpustný ve vodě a neznečišťuje životního prostředí. Lahvička může být zlikvidována s tříděným odpadem.