

Jak použít těhotenský hCG test?


Odběr vzorku moči

Chcete-li provést tento test, odebírejte vzorek moči do čisté a suché nádoby (například plastový kelímek). Ideální je první ranní moč (obsahuje vyšší koncentraci HCG). Nicméně, lze použít vzorek moči odebraný kdykoli během dne. Po provedení testu zlikvidujte použitý materiál (testovací kelímek + použitý proužek testu).



Návod k použití

1. Odeberte vzorek moči do suché a čisté nádoby. Ideálním vzorkem je první ranní moč.
2. Vyjměte testovací proužek z ochranného obalu.
3. Ponořte testovací proužek do odebrané moči tak, aby vyznačená šipka směřovala do vzorku moči
4. Testovací proužek neponořujte do moči nad vyznačenou linii MAX (maximum). Jinak test neproběhne správným způsobem.
5. Po 15 sekundách testovací proužek vyjměte ze vzorku moči a položte jej na vodorovný, neabsorpční, čistý a suchý povrch (například na vrchní část nádoby s močí).
6. Pozitivní výsledek můžete pozorovat již během 40 sekund (v závislosti na koncentraci HCG ve vzorku moči). Avšak pro potvrzení negativního výsledku je třeba vyčkat necelých 5 minut, dokud reakce neproběhne úplně.

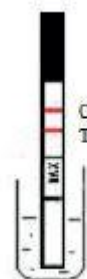

Jak správně číst výsledky

POZITIVNÍ VÝSLEDEK: V kontrolní (C) i testovací (T) zóně se zjevně objevily dvě zřetelné barevné čárky. To znamená, že byl v moči detekován HCG hormon a existuje velká možnost těhotenství. Objevené čárky mohou být slabé a jedna čárka může být světlejší než druhá; je to však stále pozitivní výsledek. Čárky se nemusí shodovat v síle ani barvě.



NEGATIVNÍ VÝSLEDEK: Objevila se pouze jedna barevná čárka v kontrolní oblasti (C). V testovací zóně (T) není patrná žádná barevná čárka. To naznačuje, že nejste těhotná nebo jste testovali příliš brzy. Pokud si nejste jistá, opakujte test znovu během následujících 48 hodin.

NEPLATNÝ VÝSLEDEK: V kontrolní (C) i testovací (T) zóně se neobjevila žádná barevná čárka. Zopakujte test s novým testovacím proužkem. Neplatné výsledky testu mohou být způsobeny: Absorpční špička nebyla důkladně navlhčena. Čtení výsledku testu bylo příliš brzy nebo příliš pozdě (po více než 5 minutách).

Upozornění

1. POUZE PRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ IN-VITRO (IVD), NE pro interní použití.
2. Před provedením tohoto testu si pečlivě přečtěte návod k použití. Proveďte každý krok přesně dle přiloženého návodu k použití.
3. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na ochranném obalu.
4. Každý jednorázový těhotenský test HCG lze použít pouze jednou, nikoli opakovaně.
5. Test nepoužívejte, pokud je ochranný obal poškozen.
6. Po otevření ochranného obalu by měl být test použit ihned.
7. Po použití zlikvidujte každý jednorázový testovací proužek včetně použité moči a použitého testovacího materiálu. S použitým materiálem zacházejte tak, jako by byl potenciálně infekční.
8. Zabraňte kontaktu s pokožkou.
9. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

Důležité informace

Diagnostický zdravotnický prostředek je určen pro sebetestování in vitro ve shodě s nařízením č.56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Obsah balení

Každá krabička obsahuje: ochranný obal s testem a návod k použití.

Každý ochranný obal obsahuje: těhotenský testovací proužek a vysoušedlo. Vysoušecí polštářek slouží pouze pro účely skladování, pro vlastní testování se nepoužívá. Každý těhotenský test (proužek) je jednotlivě balený v ochranném obalu.



Balení NEOBSAHUJE testovací materiál (kelímek na vzorek moči).

Skladování

Testovací soupravu skladujte při pokojové teplotě (4°C - 30°C) v uzavřeném ochranném obalu do data expirace. Sáček otevírejte těsně před použitím testu.

Testovací soupravy by měly být chráněny před přímým slunečním zářením, vlhkostí a teplem. Chraňte před mrazem.

Minimální trvanlivost: Minimální trvanlivost je uvedena na obale. Spotřebujte do: Spotřebujte do datumu spotřeby uvedeného na obalu. Nepoužívejte po datu spotřeby.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Pouze pro diagnostické použití in vitro |  | Viz návod k použití |
|  | Skladujte mezi 4 ~ 30°C |  | Nepoužívejte opakované |
|  | Číslo šarže |  | Datum expirace |
|  | Zplnomocněný zástupce |  | Testy na sadu |
|  | Udržujte v suchu |  | Chraňte před slunečním zářením |

CE 0123