


ŠKRTIDLA

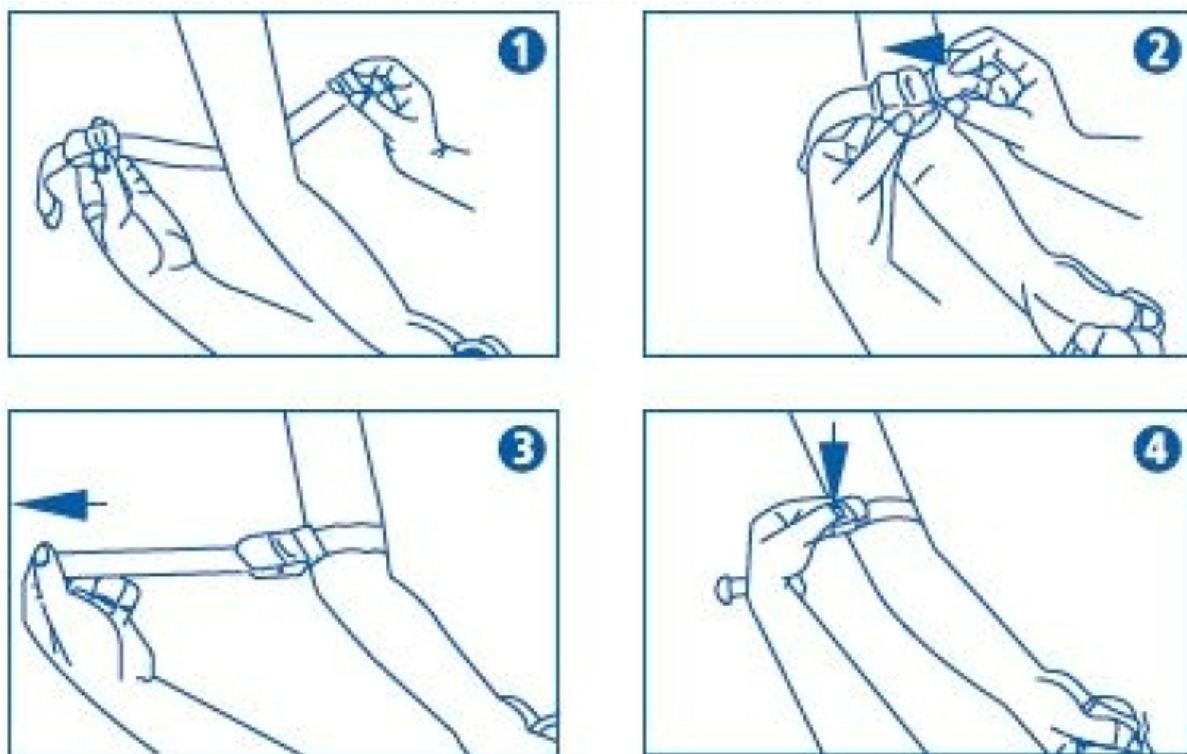

Dezinfekce: oplach a dezinfekce při nízké teplotě nebo dezinfekce ozónem při nízké teplotě. Při extrémních teplotách dochází k deformaci (nad 80 °C).

Návod k použití:

1. Rozbalte balení a vyjměte škrtdlo, roztáhněte ho horní stranou utahovacího prvku vzhůru, potom škrtdlo umístěte kolem vhodné oblasti nebo kolem loktu. (Viz Obrázek 1)
2. Spojte utahovací prvky a utáhněte je. (Viz Obrázek 2)
3. Utahujte škrtdlo, dokud nedosáhnete dostatečného utažení. (Viz Obrázek 3)
4. Při uvolňování škrtdla nejprve stiskněte utahovací prvek. Potom stiskněte tlačítko a zasouvací část vyjede z utahovací spony automaticky. (Viz Obrázek 4)

Součásti: škrtdlo ABS, plastové součásti

AMPri GmbH, Benzstrasse 16, 21423 Winsen (Luhe), Německo