


CHIRAPLUS

Návod k použití Infuzní soupravy na jedno použití




- Opis:** Infuzní souprava na jedno použití. Sterilní, netoxická, nepyrogenní.
- Komponenty:** Výrobek sestává z uzávěru zařízení na propíchnutí víčka, zařízení na propíchnutí víčka, hadičky, odkapávací kapsy, odkapávací hadičky, krevního filtru, regulátoru průtoku, sady s motýlkovou jehlou atd.
- Rozsah použití:** Používá se na klinickou žilovou infuzi, tvoří součást lékařského ošetření.
- Zákaz:** Nepoužívejte k transfuzi krve a lepivých roztoků.



- Před použitím se ujistěte, že platnost sterility, úplnost balení, číslo šarže a datum spotřeby jsou v pořádku;
- Výrobek je nutné použít okamžitě po otevření balení a po použití zlikvidovat;
- V případě poškození balení, odpadnutí uzávěru a vypršení platnosti použití není povoleno;
- Pokud během infuze dojde k neobvyklým jevům, postupujte podle pokynů klinického provozu;
- Toto zařízení neobsahuje ftaláty (**BEZ FTALÁTŮ**);
- Opětovná sterilizace nebo opětovné použití by mohly způsobit infekci nebo křížovou reakce;
- Infuzní souprava s Flashball obsahuje LATEX a je označena symbolem .



- Před použitím otevřete balení v místě označeném „zde otevřít“;
- Uzavřete regulátor průtoku, sejměte uzávěr ze zařízení k propíchnutí víčka, vložte zařízení k propíchnutí víčka do infuzního sáčku a ujistěte se, že nedochází k únikům;
- Prsty stiskněte odkapávací sáček a počkejte, kým se sáček nenaplní do poloviny infuzním roztokem;
- Otevřete regulátor průtoku, vypusťte vzduch, pozorujte kapání a začněte s infuzí;
- Před použitím pevně zasunte jehlu a zabraňte únikům.

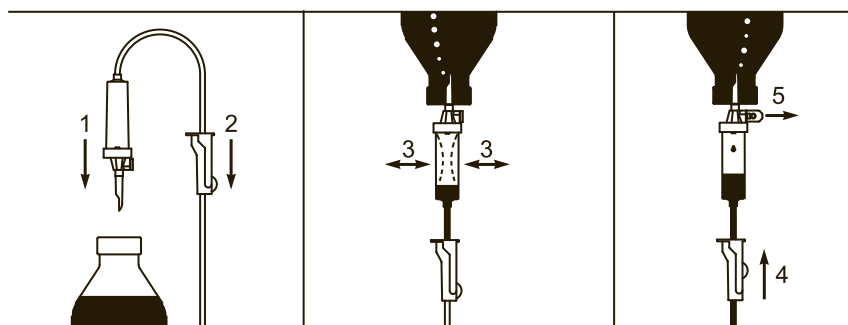

Pozor



Viz návod k použití



Referenční číslo výrobku



Číslo šarže



Datum výroby



Spotřebujte do/Datum spotřeby



Sterilizováno etylen oxidem



Vyrobeno v



Pouze na jedno použití



Výrobek bez LATEXU



S obsahem nebo přítomností přírodního kaučuku LATEX



Nepoužívejte, pokud je jednotkové balení poškozené



Bez ftalátů



Bez pyrogenů



Filtr kapaliny s velikostí pórů



Počet kapek na ml



Chraňte před slunečním zářením



Omezení teploty



Chraňte před deštěm



 **CHIRANA T. Injecta, a.s.**
 Nám. Dr. Schweitzera 194
 916 01 Stará Turá
 Slovak Republic
 Tel.: +421/32/7709 991
 Fax.: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com