



NÁVOD K POUŽITÍ

zdravotnické prostředku

Pervin/Perlan

Podložka (rouška) při lékařských nebo ošetřovacích zákrocích, aby bylo zajištěno čisté prostředí, preventivně zabraňující přenosu infekčních onemocnění.

- Podložka (rouška) v roli

1. Vybalte roli z ochranné polyethylenové fólie
2. Rozviňte roli na vhodném čistém místě (např. na stole)
3. Naměřte požadovaný díl a ustrihněte jej nůžkami
4. Ustřiženou část položte na vyšetřovací lůžko či lehátko
5. Roli vraťte do polyethylenové fólie a chraňte ji před znečištěním

- Podložka (rouška) v přířezech

1. Vybalte přířez z krabice a z ochranné polyethylenové fólie
2. Vyjměte požadovaný počet kusů
3. Složené přířezy rozložte na jejich plnou velikost na vhodném čistém místě
4. Rozložené přířezy položte na vyšetřovací lůžko či lehátko
5. Zbytek přířezů vraťte do polyethylenové fólie a chraňte je před znečištěním

Datum poslední revize návodu k použití: 01.01.2016

