

Návod k použití

Výrobce a distributor:

MEDIPLAST CZ, s.r.o.

Sídlo: Konojedská 1556/19, 100 00 Praha 10

IČ: 27176240

DIČ: CZ27176240

Provozovna: Sylvárovská 2363

544 01 Dvůr Králové nad Labem

www.mediplast.cz

e-mail: obchod@mediplast.cz



Popis: **MEDIPLAST®** je zdravotnickým prostředkem. Jedná se o náplasti, které jsou vyrobené z textilu s hydrofobní úpravou povrchu. Jsou silně lepící, nezanechávají skvrny a zbytky lepidla na pokožce, mají výbornou přilnavost. Jsou vhodné i pro citlivou pokožku. Náplasti je nutno skladovat v suchu při teplotě 5 - 25°C.

Účel použití:

Náplasti z textilu na cívce/dutince, jsou určeny k fixaci obvazů a jiného krycího materiálu na rány. Náplasti z textilu s polštářkem jsou určeny ke krytí a ošetření drobných poranění.

Způsob použití:

Náplast na cívce/dutince - náplast vyjmeme z obalu, očistíme a osušíme místo v okolí poranění, nedotýkáme se lepící vrstvy, náplast přiložíme na obvaz či gázu, zbytek na kůži a přilepíme.

Rychloobvaz (náplast s polštářkem) - náplast vyjmeme z obalu, ustříhneme požadovaný pruh náplasti, pokud to již nejsou hotové stripy, očistíme a osušíme místo v okolí poranění. Z náplasti sejmem silikonovaný papír, nedotýkáme se lepící vrstvy, polštárek jemně přiložíme na ránu a lepivý zbytek náplasti přitlačíme na pokožku.

Katalogová čísla a rozměry:

Náplasti s polštářkem		Náplasti na dutince		Náplasti na plastové cívce	
Číslo	- rozměr (mm x m)	Číslo	- rozměr (mm x m)	Číslo	- rozměr (mm x m)
1463	- 60 x 1	1110	- 12,5 x 5	1011	- 12,5 x 2
1467	- 60 x 1	1120	- 25 x 5	1021	- 25 x 2
1463 P	- 60 x 0,5	1140	- 50 x 5		
1463 P/V	- 60 x 0,5	1160	- 100 x 5		

Náplasti s polštářkem		Náplasti na dutince		Náplasti na plastové cívce	
Číslo	- rozměr (mm x m)	Číslo	- rozměr (mm x m)	Číslo	- rozměr (mm x m)
1462	- 60 x 0,02	1111	- 12,5 x 5		
1462 D	- 60 x 0,02	1121	- 25 x 5		
1462 V	- 60 x 0,02	1127	- 25 x 5		
1663	- 80 x 1	1141	- 50 x 5		
1482-3	- 80 x 0,04	1147	- 50 x 5		
1682-5	- 60 x 0,02				
1682-12D	- 60 x 0,02				
1460	- 60 x 20				
1660	- 80 x 20				

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

Datum poslední revize: 23.10.2025

