

Návod k použití

Výrobce a distributor:

MEDIPLAST CZ, s.r.o.

Sídlo: Konojedská 1556/19, 100 00 Praha 10

IČ: 27176240

DIČ: CZ27176240

Provozovna: Sylvárovská 2363

544 01 Dvůr Králové nad Labem

www.mediplast.cz

e-mail: obchod@mediplast.cz



Popis: **MEDIPLAST® F** je zdravotnickým prostředkem. Jedná se o náplasti, které jsou vyrobené z polyethylenové fólie. Jsou silně lepící, nezanechávají skvrny a zbytky lepidla na pokožce, mají dobrou přilnavost. Jsou vhodné i pro citlivou pokožku. Náplasti je nutno skladovat v suchu při teplotě 5 - 25°C.

Účel použití:

Fóliová náplast s polštářkem - je určena ke krytí a ošetření drobných poranění

Způsob použití:

Rychloobvaz (náplast s polštářkem) - náplast vyjmeme z obalu, ustříhneme požadovaný pruh náplasti, očistíme a osušíme místo v okolí poranění. Z náplasti sejmem silikonovaný papír, nedotýkáme se lepící vrstvy, polštářek jemně přiložíme na ránu a lepidlo náplasti přitlačíme na pokožku.

Katalogová čísla a rozměry:

Náplasti s polštářkem	
Číslo	- rozměr (mm x m)
F 5663	- 80 x 1

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.



Datum poslední revize: 23.10.2025