

Návod k použití

Výrobce a distributor:

MEDIPLAST CZ, s.r.o.

Sídlo: Konojedská 1556/19, 100 00 Praha 10

IČ: 27176240

DIČ: CZ27176240

Provozovna: Sylvárovská 2363

544 01 Dvůr Králové nad Labem

www.mediplast.cz

e-mail: obchod@mediplast.cz



Popis: **MEDIPOR®** je zdravotnickým prostředkem. Jedná se o náplasti, které jsou vyrobeny z netkaného textilu s hydrofobní úpravou povrchu. Je nedráždivá, nezanechává skvrny a zbytky lepidla na pokožce. Jsou vhodné i pro citlivou pokožku. Náplast je nutno skladovat v suchu při teplotě 5 - 25°C.

Účel použití:

Náplasti z netkaného textilu na dutince, jsou určeny k fixaci obvazů a jiného krycího materiálu na rány.

Náplasti z netkaného textilu s polštářkem - jsou určeny ke krytí a ošetření drobných poranění.

Způsob použití:

Náplast na dutince - náplast vyjmeme z obalu, očistíme a osušíme místo v okolí poranění, nedotýkáme se lepicí vrstvy, náplast přiložíme na obvaz či gázu, zbytek na kůži a přilepíme.

Rychloobvaz (náplast s polštářkem) - náplast vyjmeme z obalu, ustříháme požadovaný pruh náplasti, pokud to již nejsou hotové stripy, očistíme a osušíme místo v okolí poranění. Z náplasti sejmem silikonovaný papír, nedotýkáme se lepicí vrstvy, polštářek jemně přiložíme na ránu a lepidlo náplasti přitlačíme na pokožku.

Katalogová čísla a rozměry:

Náplasti s polštářkem		Náplasti na dutince	
Číslo	- rozměr (mm x m)	Číslo	- rozměr (mm x m)
2663	- 80 x 1	2010	- 12,5 x 2
2361	- 80 x 0,02	2210	- 12,5 x 10
2462	- 60 x 0,02	2211	- 12,5 x 10
2482-6	- 80 x 0,04	2221	- 25 x 10
2465	- 60 x 20		
2665	- 80 x 20		

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

Datum poslední revize: 23.10.2025

