



**PINMED**

— quality is everything —

# STŘÍKAČKA INSULINOVÁ

## Návod k použití

1. Chcete-li odkrýt píst, rozlomte bezpečnostní plombu otočením dolní krytky.
2. Chcete-li odkrýt jehlu, rozlomte bezpečnostní plombu otočením horní krytky; krytku snímejte rovně tak, abyste nepoškodili hrot jehly.
3. Chcete-li odměřit správnou dávku, zarovnejte horní hranu pístu se značkou požadované dávky na stupnici stříkačky.
4. Použijte pouze jednou. Aby nedošlo ke zneužití po použití, stříkačku i jehlu zlikvidujte.
5. K použití pouze s inzulinem U-100.

### VAROVÁNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE ZNOVU STERILIZOVAT ANI OPĚTOVNĚ POUŽÍVAT.

Před použitím zkontrolujte neporušenost zatavených plomb mezi krytkami a válcem stříkačky. Je zaručena sterilita celé dráhy průtoku tekutiny, pokud injekční stříkačka nebyla otevřena ani poškozena. Pacienti, kteří kombinují dva druhy inzulinu, nesmí měnit (a) pořadí míchání, které předepsal lékař nebo (b) model a značku injekční stříkačky bez předchozí konzultace s lékařem nebo lékárníkem. Nedodržení tohoto varování může způsobit chybu dávkování.

### DOPORUČENO PRO OSOBNÍ POUŽITÍ

**NETOXICKÉ**

**NEPYROGENNÍ**

**STERILIZOVÁNO ETHYLENOXIDEM**

**INTEGROVANÁ JEHLA**

**NÍZKÝ PRÁZDNÝ PROSTOR**

**PŘESNÁ DÁVKA**

: Ningbo PINMED Instruments Co., Ltd.

Adresa: Room(22-1)(22-2), No.455, East Zhongshan Road, Yinzhou District, 315040 Ningbo, Čínská lidová republika

: Lotus NL B.V.

Adresa: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Nizozemsko.

Vyrobeno v Číně

Dovozce: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Sídlo: Juárezova 17, 160 00 Praha 6

Office: Novodvorská 136, 140 00 Praha 4, Česká republika