



semikvantitativní test CRP

Rychlý test na **semikvantitativní** vyšetření CRP. **Jedná se o specifický imunochromatografický test.** Test je vhodný jak do ordinací lékaře, tak i při použití v terénu. Výsledek znáte ihned. Součástí testovacího kitu je vše co potřebujete k jeho provedení.

Provedením tohoto jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování antibiotik pacientům, kteří mají virovou infekci.

- ✓ výsledek do 5 min.
- ✓ jednoduché
- ✓ levné
- ✓ rychlé
- ✓ bez využití přístroje


Součástí balení jsou lancety pro snadný kapilární odběr.




Veškerá sdělení mají pouze informační charakter, bez záruky správnosti jeho obsahu. QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o., neručí za správnost obsahu z důvodu možných tiskových a redakčních chyb. Reklama je určena pro odborníky. Pozorně si přečtěte návod k použití. Použití obrázků a textů není bez předchozího souhlasu dovoleno. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání 05/2023 ©2023 QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.

PROVEDENÍ TESTU – QUICK CRP

A Krví naplněnou kapiláru vložte do lahvičky s pufrem.

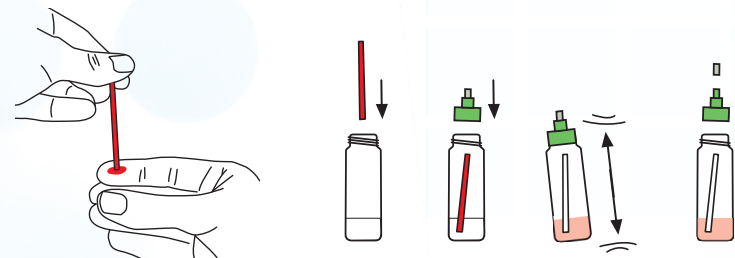

B Po odšroubování víčka na lahvičce se kápnou 3 kapky na testovací kazetu do jamky S a podle zbarvených červených linek na kazetě se odečte výsledek.

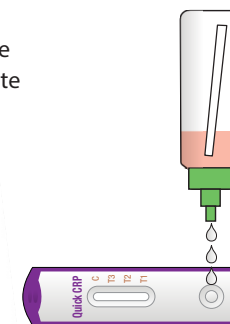

C Vyhodnocení testu

