

NÁVOD NA POUŽITÍ

-

NÁSTROJE CHIRURGICKÉ, NA MANIKÚRU A PEDIKÚRU, NEREZ KAZETY

- Nástroje, kazety jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Přesto je nutné s nimi zacházet dle následujících pokynů tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.
- Nástroje, kazety by neměly být dlouhodobě vystavovány působení halogenových prvků (fluor, chlor, jod), alkalických roztoků, kyselin a minerálů. Je nevhodné je ponechávat i v pitné vodě, neboť obsahuje výše uvedené prvky.

ČISTĚNÍ A DESINFEKCE

Nástroje, kazety je nutné důkladně omýt a očistit v čisté vodě od krve, tkání nebo sekretu a to ihned po použití. Nástroje rozevřete a očistěte měkkým kartáčem (nesmíte použít brusné materiály). Nenechte, aby nečistoty na nástrojích zaschly.

Můžete použít vhodné čisticí a desinfekční prostředky (lázeň), dodržujte však předepsanou koncentraci, teplotu roztoku a čas působení. Potom nástroje, kazety omyjte destilovanou vodou a důkladně osušte měkkým a čistým hadrem.

S nástroji a kazetami zacházejte vždy šetrně a pokládejte je vedle sebe nikoliv přes sebe.

Nakonec nástroje i kazety promažte nekorozivním, sterilním olejem.

STERILIZACE

Sterilizaci provádějte v autoklávech (parní ster.) do 145 °C, popř. v horkovzdušných sterilizátorech do 200 °C. Kazety a misky jsou vhodné pro sterilizaci v horkovzdušných sterilizátorech.

Veškerou sterilizaci provádějte v souladu s nařízením hlavního hygienika.

Výrobce:

SUMA Medical Devices, P.O.Box 2494, Muhammad Pura, Sialkot, Pakistan

Dovozce: ZSZ s.r.o., Na Volánové 19, PRAHA 6, 16000

Datum vydání: 1. 1. 2019