

**ČESKY**

## INSTRUKCE PRO POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ IN VITRO

(směrnice 98/79/ES)

- **Pouze pro profesionální použití.**
- Výhradně pro laboratorní použití.
- V případě vylití obsahu používejte rukavice: nebezpečí kontaminace.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky a pracujte podle platných předpisů.
- Chraňte před ohněm nebo zdrojem tepla: nebezpečí poškození výrobku.
- Doporučená teplota skladování: -10°C ÷ +50°C, není-li určeno jinak.
- Skladujte na suchém místě.
- Chraňte před dětmi.
- Neměňte původní účel použití produktu, používejte pouze ve vhodných přístrojích.
- Před použitím výrobku s určitými substancemi zkontrolujte odolnost a kompatibilitnost materiálu dle tabulek.
- Maximální počet otáček u testovacích zkumavek se liší dle použitého materiálu:  
pro PMMA 3,000 rpm, pro PS 2,000 rpm, pro PP 4,500 rpm.
- Maximální čas centrifugace: 30 minut.
- Výrobky používejte pouze s poskytnutým příslušenstvím (víka, stojánky, atd.).
- Nepoužívejte po uplynutí data expirace.
- Sterilní výrobky nepoužívejte, jestliže jejich obal byl poškozen.
- Sterilita je garantována do otevření balení.

### Význam symbolů na obalech



Výrobek splňuje podmínky směrnice 98/79/EC pro ZP IVD



"Pro jednorázové použití"



"Šarže"



Upozornění: "Čtěte příbalový leták"



"Expirace"



"Teplotní omezení"




"Výrobce"



Zdravotnický prostředek "In Vitro"



"Křehké"

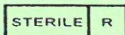

"Sterilizace zářením"



"Nepoužívejte v případě poškození obalu"



"Nevystavujte slunečnímu záření"



"Skladujte v suchu"

IVD Instrukce CZ aktuální verze